



OPTIGLOW SF

SIMULADOR DE CONTAMINAÇÃO

Limpar corretamente as superfícies pode salvar vidas! Em locais onde a contaminação pode oferecer riscos graves às pessoas, a adesão às regras de limpeza são essenciais, pois inibe a proliferação de microrganismos e reduz os riscos de infecções. Optiglow® SF foi desenvolvido para o treinamento das equipes e monitoramento para assegurar a eficácia do processo de limpeza.



Apresentação em aerossol



Dispensa contato com a superfície



Acompanha lanterna com luz Ultravioleta (UV)

3000
aplicações

Alto rendimento



DESCRIÇÃO

Optiglow® SF é um produto para ajudar no monitoramento e na validação de processos de limpeza. Trata-se de uma solução aplicada na forma de aerossol, que contém um marcador químico fluorescente que simula a contaminação e só pode ser visto através do uso da lanterna de luz ultravioleta fornecida no kit. Mostra aos profissionais que, mesmo estando aparentemente limpas, as superfícies podem abrigar microrganismos e outros contaminantes que oferecem grande risco às pessoas e auxilia no treinamento das equipes uma vez que indica falhas no processo.

ATRIBUTOS



Ação simples, que pode salvar muitas vidas;



Indica falhas no processo de limpeza



Auxilia nos treinamentos da equipe



Monitora limpeza de superfície

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, veículos de resgate médicos, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios [...] que deseje realizar monitoramento do processo de limpeza.



SUPERFÍCIE

Optiglow® SF é um produto invisível a olho nú. Compatível com diversos materiais, a remoção do produto em superfícies porosas pode exigir uma esfregação maior

MODO DE USAR



- 1- Selecionar as superfícies e locais de aplicação.
- 2- Agitar bem o frasco de Optiglow® SF. Aproximar o produto à +- 2cm da superfície e aplicar nos pontos desejados.

Nota: aplicar sem que a equipe de higiene e limpeza tenha conhecimento da auditoria realizada, pois a ciência sobre o monitoramento pode mudar o comportamento dos profissionais, alterando o resultado da avaliação.



- 3- Assim que a limpeza for finalizada, escureça o ambiente, retorne com a lanterna fornecida no kit e verifique se os pontos marcados ainda apresentam fluorescência.



LEITURA DO RESULTADO

Os pontos que apresentarem fluorescência após a higienização são considerados pontos de falha na limpeza. Compartilhe com a equipe os resultados, repita a limpeza do ambiente e intensifique treinamentos focados nas fragilidades.

IMPORTANTE: o agente químico utilizado é insolúvel no propelente do aerossol e pode se depositar no fundo da lata. **É importante AGITAR BEM A EMBALAGEM** antes de usar o produto. Se a embalagem ficar parada por muito tempo, é recomendável agitá-la e acionar a válvula algumas vezes, até ter certeza de que o agente fluorescente está bem incorporado.

Para que se obtenha melhor desempenho é muito importante escolher bem as superfícies e os locais que serão marcados. Considere os seguintes pontos:

- 1- Procure variar bastante as superfícies e locais. Se as mesmas superfícies são constantemente marcadas, os colaboradores podem se acostumar e desenvolver um comportamento direcionado a limpar com mais cuidados aquelas superfícies;
- 2- Não marque pontos muito próximos uns dos outros, pois uma única passada do pano poderá remover vários pontos, desperdiçando produto.
- 3- Evite superfícies porosas, pois são mais difíceis de remover o marcador, sendo necessária uma esfregação mais intensa.
- 4- Sempre anote previamente todos os locais que serão marcados, se possível tirando fotos para não se confundir no momento da avaliação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- ✓ Ácool
- ✓ Glicarina
- ✓ Corante óptico
- ✓ Propelente

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 1 frasco spray 100ml acompanhado de lanterna fluorescente
- ✓ Caixa com 6 frascos spray 100ml

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não aplicar esse produto em equipamentos eletrônicos. Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração. Proteger os olhos durante a aplicação. CUIDADO: Inflamável! Manter longe das chamas e superfícies aquecidas. Conteúdo sob pressão. A embalagem, mesmo vazia, não deve ser perfurada. Não usar ou guardar em lugar quente, próximo à chamas ou exposto ao sol. Nunca colocar esta embalagem no fogo ou incinerador. Manter o recipiente hermeticamente fechado em ambiente fresco ou ventilado. Não expor à temperatura maior que 50°C. Manter o produto na embalagem original. Não guardar este produto dentro de automóveis. Evitar contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lavar e secar as mãos. Em caso de contato com os olhos, lavar, imediatamente, com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar, imediatamente, o Centro de Intoxicações (tel.: 0800 722 6001) ou o médico, levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

