



OPTIGERM PRONTO-USO

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Optigerm® é um desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos. Age em apenas 1 minuto com ação comprovada contra fungos, bactérias multirresistentes, micobactérias, esporos e vírus. Possui efeito residual de até 30 dias, oferecendo maior segurança ao processo de limpeza e desinfecção. Sua embalagem contém lacre inviolável, trazendo segurança aos pacientes e profissionais de saúde.



1 min de contato incluindo bactérias multirresistentes e Candida auris



Mais seguro, contém lacre inviolável



3 min de contato Clostridium difficile de forma esporulada



Combate o Biofilme



DESCRIÇÃO

Desenvolvido para instituições que oferecem assistência à saúde com excelência e em locais com maior risco aos pacientes e profissionais de saúde. Oferece rápida ação, pois possui fórmula avançada à base de quaternário de amônio de 5ª geração e PHMB, apresentando compatibilidade com diversas superfícies, incluindo equipamentos e telas. Sua aplicação prática e segura é perfeita para ambientes de saúde que exigem máxima proteção, como hospitais, clínicas e laboratórios.

ATRIBUTOS



Dispensação em espuma



Não corrosivo



Limpa e desinfeta em uma única operação



Mistura sinérgica de quaternário amônio de 5ª geração e PHMB



Ação contra: fungos, vírus, bactérias multirresistentes, bacilos, micobactérias e esporos



2 min de contato contra Covid-19



Efeito residual de 30 dias



Compatível com monitores e telas touch



Compatibilidade com diversas superfícies



Embalagem com faixa para visualização do nível do produto.

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para todos os ambientes de assistência à saúde, como: hospitais, laboratórios, clínicas (médicas, fisioterapêuticas, estética, odontológicas, etc.), consultórios e serviços de resgate.



SUPERFÍCIE

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. É compatível com diversos materiais, inclusive equipamentos, monitores e telas touch.

DILUIÇÃO

Optigerm é pronto uso e não deve ser diluído.

MODO DE USAR



1 - Borrifar o Optigerm® no pano em quantidade suficiente para garantir que a superfície permaneça úmida durante o tempo necessário para a ação desinfetante;



2- Em seguida aplicar sobre a superfície desejada no sentido unidirecional e aguardar secar naturalmente respeitando o tempo de ação recomendado.

USO DE EPIs



LUVAS



ÓCULOS DE SEGURANÇA

Nota: a ação se mantém mesmo na presença de matéria orgânica, entretanto, se houver sujidade aparente, repita a aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
Odor	Característico, sem fragrância
Densidade a 20/40°C	1,000 a 1,010
pH a 25°C	9,0 a 10,0
Índice de refração a 20°C	1,3382 a 1,3390

COMPOSIÇÃO

- ✓ Polihexametileno biguanida (PHMB): 1.600 ppm
- ✓ Quaternário de amônio 5ª Geração: 2.400 ppm
- ✓ Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes: q.s.p. 100%

VALIDADE

24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 6 frascos de 750 ml com pulverizador

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3.1003.0111
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consultar um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Centro de Intoxicações: (tel.: 0800 771 3733).



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

