



OPTIGERM® WIPE

PANOS UMEDECIDOS PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Optigerm® Wipe é um desinfetante hospitalar pronto uso, para superfícies fixas e artigos não críticos, aplicado de forma prática e eficaz. Possui ação em apenas 1 minuto contra microrganismos, incluindo bactérias multirresistentes, e efeito residual de até 30 dias, ele une limpeza e desinfecção em uma única operação, promovendo segurança, agilidade e maior adesão aos protocolos de higiene em ambientes de alta circulação.



1 min de contato incluindo bactérias multirresistentes



3 min de contato para esporo *Clostridium difficile*

30 DIAS

Efeito residual de 30 dias



Combate o Biofilme



DESCRIÇÃO

Optigerm® Wipe é impregnado com um desinfetante hospitalar pronto uso, para limpeza e desinfecção diária de superfícies fixas e artigos não críticos com maior risco de contaminação cruzada. Desenvolvido para instituições que oferecem assistência à saúde com máxima excelência e locais com maior risco aos pacientes e profissionais de saúde. Possui rápida eficácia contra diversos microrganismos, agregando mais praticidade e agilidade ao processo.

ATRIBUTOS



Diferentes apresentações para atender áreas distintas.



Não corrosivo



2 min de contato contra Covid-19



Rápido, prático e fácil de usar



Mistura sinérgica de quaternário de amônio de 5ª geração e biguanida



Compatibilidade com diversas superfícies



Limpa e desinfeta em uma única operação



Ação contra: fungos, vírus, bactérias multirresistentes, bacilos, micobactérias e esporos

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para todos os ambientes de assistência à saúde, como: hospitais, laboratórios, clínicas (médicas, fisioterapêuticas, estética, odontológicas, etc.), consultórios e serviços de resgate.



SUPERFÍCIE

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. É compatível com diversos materiais, inclusive equipamentos, monitores e telas touch.

DILUIÇÃO

VERSÃO	QUANTIDADE	TAMANHO	RENDIMENTO	GRAMATURA
Balde	100 unidades	20,5X13cm	1,5m ²	60g
Pack	48 unidades	19X14cm	0,5m ²	30g

MODO DE USAR



- 1 - Remover o Optigerm® Wipe da embalagem.
- 2 - Aplicar sobre a superfície desejada em sentido unidirecional.



- 3 - Aguardar o tempo de ação recomendado.
- Nota:** Manter a embalagem sempre fechada, garantindo a integridade do produto.

USO DE EPIs



LUVAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
Odor	Característico, sem fragrância
Densidade a 20/40°C	1,000 a 1,010
pH a 25°C	9,0 a 10,0
Índice de refração a 20°C	1,3382 a 1,3390

COMPOSIÇÃO

- ✓ Polihexametileno biguanida (PHMB): 1.600 ppm
- ✓ Quaternário de amônio 5ª Geração: 2.400 ppm
- ✓ Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes: q.s.p. 100%

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 6 baldes contendo 100 unidades cada
- ✓ Caixa com 4 cartuchos de 12 packs contendo 48 unidades cada

VALIDADE

24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.
Após abertura: 24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo ou enquanto os wipes estiverem úmidos.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3.1003.0107
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consultar um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Centro de Intoxicações: (tel.: 0800 771 3733).



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

