



OPTIGERM HYPERC

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Para aumentar a adesão de uso dos profissionais aos protocolos de limpeza, desinfecção e alvejamento, precisamos de uma solução que ofereça praticidade e segurança, requisitos que só a marca Optigerm pode oferecer.



Ação contra
Clostridium difficile



Alto rendimento



Possui versão
bag-in-box para utilizar
no sistema Olik®

**30
DIAS**

Efeito residual de
30 dias



DESCRIÇÃO

É um hiper concentrado, ideal para superfícies que consomem grande volume de produto. Além de ser recomendado para hospitais, também é indicado para empresas limpadoras da área da saúde, devido ao alto rendimento, amplo espectro de ação e compatibilidade com diversos materiais, garantindo uma operação eficiente e segura.

ATRIBUTOS



Excelente custo
benefício



Mistura sinérgica de
quaternário amônio
de 5ª geração e
biguanida



Alto poder de
limpeza com
ação contra o
Biofilme



Limpa e desinfeta
em uma única
operação;



Possui amplo
espectro de
ação



Validade da
solução pronta
para uso de 30 dias



Tempo de
contato de
10min



laudos para:
bactérias incluindo
as multiresistentes e
esporos
bacterianos

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições hospitalares de grande porte e empresas limpadoras da área da saúde.



SUPERFÍCIE

Indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, portas, divisórias, mobiliário e demais superfícies fixas e artigos não críticos.

DILUIÇÃO

APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		VOLUME DE PRODUTO CONCENTRANDO PARA 1L DE ÁGUA	RENDIMENTO DA EMBALAGEM DE 5L
	PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA		
MICROORGANISMO	1	399	2,5ml	2000lts
CLOSTRIDIUM DIFFICILE	1	199	5ml	1000lts

MODO DE USAR



Para limpeza de piso, parede e teto

Aplicar a solução de Optigerm Hyper C diluída diretamente na superfície ou através de aplicador por pressão JET 2000®, mop ou outra ferramenta apropriada. Garanta que toda superfície esteja úmida, se necessário aplicar ação mecânica para remover a sujidade. Aguardar a secagem, respeitando o tempo de ação de 10min.



Para artigos não críticos

Aplique o Optigerm Hyper C diluído e em seguida espalhe pelo artigo desejado. Aguarde a secagem, respeitando o tempo de ação de 10min.

USO DE EPIs



LUVAS



ÓCULOS DE
SEGURANÇA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido esverdeado, baixa viscosidade
Densidade 20/4°C (g/cm³)	0,980/1,010
pH do produto puro	8,00 a 9,50
Validade	24 meses, na embalagem original

COMPOSIÇÃO

- ✓ Polihexametileno biguanida (PHMB): 1.600 ppm
- ✓ Quaternário de amônio 5ª Geração: 2.400 ppm
- ✓ Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes: q.s.p. 100%

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixas com 4 embalagens de 5 litros
- ✓ Bag-in-box com 20 litros para utilizar na OLIK

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

APÓS DILUÍDO EM EMBALAGEM LIMPA E PLÁSTICA COM TAMPA:
30 dias.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3.1003.0115
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL



SAIBA MAIS SOBRE
O SISTEMA OLIK

