



OPTIZYME PRÉ LIMPEZA

PRONTO USO 4 ENZIMAS

O Optizyme® Pré-Limpeza é um detergente multienzimático com propriedades umectantes e emolientes, formulado para oferecer alta performance com segurança. Desenvolvido com tensoativos que não agredem o profissional nem o meio ambiente, sua composição é 100% biodegradável, livre de corantes, fragrâncias e nonilfenol etoxilado, além de não ser corrosivo. Sua formulação inclui a Peptidase, enzima que otimiza a remoção de sangue seco, garantindo resultados de limpeza ainda mais eficientes.



Age em sangue seco e em matéria orgânica



Lacre inviolável



Umectação por 24 horas



Livre de nonilfenol etoxilado



DESCRIÇÃO

O Optizyme® Pré Limpeza é um detergente multienzimático combinado com surfactante de alto poder de espumação, desenvolvido para a pré-limpeza de instrumentais cirúrgicos, odontológicos e endoscópicos. Sua formulação contém quatro enzimas — protease, amilase, lipase e peptidase — que atuam de forma sinérgica na remoção eficaz de sangue, proteínas, gorduras e carboidratos. Promove alta performance na limpeza e prolonga a umectação dos instrumentais por até 24 horas. Possui um aplicador ergonômico com gatilho 2 em 1 que pode ser utilizado como spray ou espuma, sendo fácil e seguro, pois é composto por um lacre inviolável impossibilitando o seu rompimento, promovendo mais segurança ao profissional evitando contaminação cruzada ou mistura química.

ATRIBUTOS



Não mancha inox



Espumação densa e direcionada



Biodegradável



Compatível com diversos tipos de instrumentais cirúrgicos



Estabilidade enzimática comprovada



pH neutro



Não corrosivo



Livre de corantes e fragrâncias



Seguro para o usuário



Aplicador ergonômico com gatilho 2 em 1 (spray e espuma)

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, etc.

INDICAÇÕES

Optizyme® Pronto Uso é um detergente multienzimático para pré-limpeza de superfícies internas e externas dos instrumentais cirúrgicos evitando a impregnação da matéria biológica, fragmentando as proteínas, carboidratos e gorduras, especialmente agindo na umectação de fluidos corporais.

MECANISMO DE AÇÃO

A mistura sinérgica das enzimas que compõem o blend do Optizyme Concentrado, potencializa o resultado dos ativos em suas atuações específicas:

Protease: Enzima que quebra proteínas complexas, como sangue e tecidos biológicos.

Amilase: Atua sobre os carboidratos, convertendo amidos em moléculas menores e solúveis.

Lipase: Degrada gorduras e óleos, facilitando a dissolução de resíduos lipídicos.

Peptidase: Complementa a ação da protease, degradando fragmentos proteicos remanescentes.

Tensoativo Aniônico: garante uma excelente detergência, elevado poder de espumação, boa solubilidade em água e espessamento na presença de eletrólitos.

MODO DE USAR



- 1- Aplicar o Optizyme® Pré Limpeza diretamente nos instrumentais ou endoscópios imediatamente após o uso, garantindo a cobertura total e uniforme, com atenção especial aos lúmens.
- 2- O Optizyme deve permanecer em contato com o material até o momento do procedimento de limpeza.
- 3- Enxaguar para a remoção do produto antes de proceder com a limpeza manual ou automatizada.

USO DE EPIs



LUVAS

Observação: Não adicionar água aos instrumentais após a aplicação do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Líquido transparente
Odor	Característico, sem fragrância
pH a 25°C	6,5 a 8,0

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 6 frascos de 750 ml com pulverizador/espuma

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3100301450016
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

COMPOSIÇÃO

- ✓ Protease
- ✓ Amilase
- ✓ Lipase
- ✓ Peptidase
- ✓ Lauril éter sulfato de sódio
- ✓ Veículo
- ✓ Estabilizante
- ✓ Umectantes
- ✓ Emolientes
- ✓ Conservante

Tensoativo aniônico:

lauril éter sulfato de sódio 70% - 1,50% (p/p).

ATIVIDADES ENZIMÁTICAS:

- ✓ **Atividade proteolítica mínima:** 2,8919 UP.mL⁻¹.min⁻¹
- ✓ **Atividade amilolítica mínima:** 0,1257 UA.mL⁻¹.min⁻¹

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e seco, longe da luz e de substâncias oxidantes. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

VALIDADE

24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

ATENÇÃO! Provoca irritação ocular e cutânea. Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante a manipulação do produto. Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica - Ceatox (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL