



OPTIGERM OXIKILL PRONTO USO

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

O Optigerm® Oxikill Pronto Uso é um desinfetante hospitalar desenvolvido especialmente para a limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Este produto de alta performance foi formulado para simplificar e otimizar os processos de limpeza e controle microbiológico em ambientes nos quais a segurança é inegociável.



Mais seguro,
contém lacre
inviolável



Com Quaternário
Bicarbonatado



Tempo de contato de
30 segundos



Ação de 2 minutos em
Clostridium difficile



DESCRIÇÃO

Optigerm® Oxikill Pronto Uso é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Combina o poder de três princípios ativos sinergicamente equilibrados, potencializados por agentes que quebram a estrutura química da membrana celular, aumentando o espectro de ação, reduzindo o tempo de contato e melhorando o poder de limpeza. Age por dois mecanismos distintos: oxidação e desnaturação da parede celular. O produto apresenta eficácia comprovada na presença de matéria orgânica e pode executar as funções de limpeza, alvejamento e desinfecção em uma única operação.

ATRIBUTOS



3 em 1: Limpa,
desinfeta e alveja em
uma única operação



Age por dois
mecanismos de
ação: desnaturação
celular e oxidação



Excelente
custo benefício



Prático e seguro



Eficácia comprovada
contra diversos
microrganismos



Não corrosivo



Ação contra
o Biofilme



Age mesmo na
presença de
matéria orgânica

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para todos os ambientes de assistência à saúde, como: hospitais, laboratórios, clínicas (médicas, fisioterapêuticas, estética, odontológicas, etc.), consultórios e serviços de resgate.



SUPERFÍCIE

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. É compatível com diversos materiais, inclusive equipamentos, monitores e telas touch.

DILUIÇÃO

Optigerm® Oxikill é pronto uso e não deve ser diluído.

MODO DE USAR



Limpeza e desinfecção de superfícies fixas:

borrifar Optigerm Oxikill® Pronto Uso no pano em quantidade suficiente para garantir que a superfície permaneça úmida durante o tempo necessário para a ação desinfetante (30 segundos). Em seguida, aplicar sobre a superfície desejada no sentido unidirecional e aguardar secar naturalmente, respeitando o tempo de ação recomendado.



Limpeza e desinfecção de artigos não críticos:

borrifar Optigerm Oxikill® Pronto Uso nos artigos ou imergi-los no produto puro e deixar em contato por 30 segundos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

USO DE EPIs



LUVAS



ÓCULOS DE
SEGURANÇA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Translúcido
Odor	Característico
Densidade a 20/40°C	0,99 - 1,02g/mL
pH a 25°C	2,3 - 2,7
Índice de refração a 20°C	1,5 - 2,5

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 12 frascos de 500 ml com pulverizador
- ✓ Caixa com 6 frascos de 750 ml com pulverizador

COMPOSIÇÃO

- ✓ Ativos
- ✓ Tensoativo não iônico
- ✓ Tensoativo catiônico
- ✓ Sequestrante
- ✓ Veículo

PRINCÍPIOS ATIVOS

- ✓ Peróxido de Hidrogênio: 0,5% (p/p)
- ✓ Cloreto de Didecil Dimetil Amônio: 0,3% (p/p)
- ✓ Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio: 0,2%
- ✓ Carbonato de Didecil Dimetil Amônio: 0,5% (p/p)

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	310030149
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou a aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Usar luvas e máscaras para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Em caso de contato com os olhos e com a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens. Centro de Intoxicações: 0800.771.3733.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

